

Guía de ajuste para el paciente de Philips DreamWear

Almohadilla nasal

Utilizando el medidor de almohadilla nasal (incluido en la máscara), sosténgalo de manera horizontal por debajo de la nariz. Seleccione el tamaño según la ubicación del borde exterior de sus fosas nasales y del contacto de la punta de su nariz con el medidor.

Nota: hay disponibles cuatro tamaños de almohadillas (pequeño, mediano, grande y medio ancho)



1

La abertura de la almohadilla quedará directamente debajo de las fosas nasales. La almohadilla cubrirá la nariz y boca de manera que la fuga será mínima.

Nota: La nariz no debe estar en ningún momento dentro de la abertura de la almohadilla. Si alguna parte de la almohadilla se superpone a la nariz, la almohadilla se está usando de manera incorrecta.



2

Con la máscara ensamblada, coloque la almohadilla debajo de la nariz.



3

Coloque el marco en la parte superior de la cabeza. Tire del arnés sobre la parte posterior de la cabeza.



4

Para ajustar la máscara, despegue las lengüetas del arnés de la tela. Ajuste la longitud de las correas. Presione las lengüetas hacia atrás contra la tela para volver a colocarlas.

Nota: No apriete demasiado el arnés.



5

Ajuste la máscara en una posición que se ajuste cómodamente.



6

Cuando termine, la conexión del tubo debe quedar en la parte superior de la cabeza.

Nota: Por favor lea las instrucciones de uso para obtener más información sobre el ajuste.